



BAUSCH + LOMB

Artelac[®] NighttimeGel

Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju — tajā ir svarīga informācija par produkta lietošanu. Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet farmaceitam vai ārstam vai sazinieties ar mums.

2 mg/g karbomēra, triglicerīdi ar vidēju ķēdes garumu
Paredzētā lietošana: Artelac[®] Nighttime Gel ir acu lubrikants.

Kas ir Artelac[®] Nighttime Gel?

Artelac[®] Nighttime Gel ir acu gēls. 1 g satur 2 mg karbomēra, triglicerīdus ar vidēju ķēdes garumu un sterilu ūdeni, sorbītu un nātrija hidroksīdu.
Kā konservants izmantots cetrimīds.

Pēc attaisīšanas izlietot 6 nedēļu laikā.

Paredzētā Artelac[®] Nighttime Gel lietošana

Artelac[®] Nighttime Gel ir augstas viskozitātes acu lubrikants, kas papildina visas trīs asaru slāņa kārtiņas, un sausās acs sajūtas gadījumā nodrošina ilgstošu acs virsmas mitrināšanu un aizsardzību.

Sākumā pēc Artelac[®] Nighttime Gel lietošanas rodas redzes miglošanās, bet pēc acs mirkšķināšanas gēls izplatās, tāpēc daudzi cilvēki izvēlas lietot šo spēcīgo līdzekli pirms naktsmieņa.

Kad Jums būtu jālieto Artelac[®] Nighttime Gel

Artelac[®] Nighttime Gel ir paredzēts tam, lai papildinātu trīs asaru slāņa kārtas, arī ļoti svarīgo ārējo lipīdu kārtu, maksimāli mazinot simptomus un aizturot mitrumu uz acs virsmas. Tas nomierinoši iedarbojas uz acīm un vienlaikus saista tajās mitrumu, nodrošinot ilgstošu simptomu atvieglojumu. Tas ir piemērots gadījumos ja novērojāt vairākus sausās acs sindroma simptomus piemēram, nogurumu, kairinājumu, graušanas sajūtu, dedzināšanu un/vai asarošanu. Cilvēki var gūt papildus aizsardzību, jo ņemot vērā šī līdzekļa īpašības, tas, lietots papildus ierastajam līdzeklim pret acu sausumu, var labvēlīgi iedarboties nodrošinot papildu aizsardzību.

Sausās acs sindromu var izraisīt:

- Ārējie faktori, piemēram, pārmērīga datora lietošana, gaisa kondicionēšana, apkure, cigarešu dūmi, kā arī vējains laiks vai kontaktlēcu lietošana.
- Citi faktori, piemēram, zāles (tostarp kontracepcijas līdzekļi, antihistamīni, bēta blokatori, antispazmolitiskie un diurētiskie līdzekļi), vai zināmas slimības, par kurām zināms, ka tās veicina acu sausuma attīstību.

Cik bieži jālieto Artelac[®] Nighttime Gel?

Iepiliniēt vienu **Artelac[®] Nighttime Gel** gēla pilienu acī 15 min pirms naktsmieņa; vai arī katru dienu var lietot 3 līdz 5 gēla pilienus.

Kādos gadījumos Artelac[®] Nighttime Gel nevajadzētu lietot?

Nelietojiet šo produktu, ja Jums ir paaugstināta jutība pret kādu no sastāvdaļām.

Svarīga informācija par Artelac[®] Nighttime Gel lietošanu

- Ļoti retos gadījumos ziņots par lokālu paaugstinātas jutības reakciju. Šādos gadījumos ārstēšana jāpārtrauc.
- Šis produkts pēc iepilināšanas acī var izraisīt īslaicīgu redzes miglošanos, kas var negatīvi ietekmēt spēju vadīt transportlīdzekļus vai strādāt ar mehānismiem.
- Nepieskarieties acs virsmai ar tūbiņas galu, lai novērstu iespējamu acs virsmas traumu.
- Pirms lietošanas izņemiet kontaktlēcas.
- Pagaidiet aptuveni 15 minūtes, pirms izmantojat citu acī lietojamu produktu vai ielieciet atpakaļ kontaktlēcas.
- Nepieskarieties acs virsmai vai pirkstiem ar tūbiņas galu, lai novērstu iespējamu gēla kontamināciju.
- Nelietojiet pēc derīguma termiņa beigām.
- Nelietojiet, ja tūbiņa ir bojāta.

Kā uzglabāt Artelac[®] Nighttime Gel?


Uzglabāt temperatūrā līdz +25°C. Pēc attaisīšanas izlietot 6 nedēļu laikā.




Kā lietot Artelac® Nighttime Gel:




1. Pirms katras lietošanas reizes noņemiet aizsargājošo uzgali no tūbiņas gala.

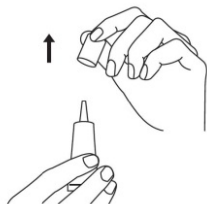

2. Nedaudz atlieciet galvu atpakaļ, ar brīvās rokas pirkstu nedaudz pavelciet apakšējo plakstiņu uz leju un turiet tūbiņu vertikāli ar sprauslu uz leju virs acs. Tad uzmanīgi saspiediet tūbiņu, lai izspiestu vienu gela pilienu.

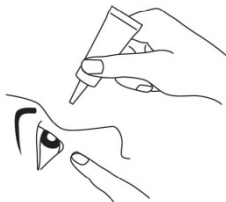

3. Pēc lietošanas atkal uzlieciet tūbiņai uzgali.

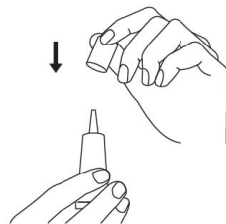

Pēc tam aizveriet aci, lēni pakustiniet to uz augšu un uz leju un tad samirkšķiniet aci, lai gela piliens optimāli izkliedētos uz acs virsmas.

Iepakojums:

Artelac® Nighttime Gel ir pieejams 10 g un 3 x 10 g tūbiņās.

STERILE A

Sterilizēts, izmantojot aseptiskas apstrādes metodes.



Izmest medicīnisko ierīci 6 nedēļas pēc atvēršanas.



Maksimālās temperatūras ierobežojumi



Skatiet lietošanas instrukciju



Nelietot, ja iepakojums ir bojāts.



Derīguma termiņš



Partijas kods

CE 0483



Legal Manufacturer

Insert full address of legally responsible manufacturer as per DOC

ANG01B100LV02

